



## BAŃKI CHIŃSKIE BEZOGNIOWE GUMOWE 4SZT MERIDIAN

CENA: **28,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: MERIDIAN

KOD EAN: 5906489288043

### OPIS PRZEDMIOTU

#### **BAŃKI CHIŃSKIE AKUPUNKTUROWE GUMOWE BEZOGNIOWE JIAN SHEN GUAN 4 SZTUKI ANTICELLULITOWE I DO MASAŻU - MERIDIAN**

ZESTAW ZAWIERA 4 SZTUKI BANIEK WYKONANYCH ZE SPRĘŻYSTEJ GUMY SPEŁNIAJĄCEJ NORMY WŁAŚCIWE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH. PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT JAKOŚCI CE.

BAŃKI SĄ W CZTERECH WIELKOŚCIACH:

1. NAJMNIEJSZA - ŚREDNICA PRZYSSAWKI 26MM
2. ŚREDNIA MNIEJSZA - ŚREDNICA PRZYSSAWKI 41MM
3. ŚREDNIA WIĘKSZA - ŚREDNICA PRZYSSAWKI 53MM
4. DUŻA - ŚREDNICA PRZYSSAWKI 64MM.

OPAKOWANIE ZAWIERA RÓWNIEŻ BROSZURĘ DLA KLIENTA, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA.

- W TRADYJCJI CHIŃSKIEJ, BAŃKI STOSOWANE SĄ DO ŁAGODZENIA SZEREGU DOLEGLIWOŚCI. SĄ RÓWNIEŻ DOSKONAŁYM NARZĘDZIEM **DO PRZEPROWADZANIA MASAŻU REDUKUJĄCYCH CELLULITIS** ORAZ RELAKSACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH ZARÓWNO W PROFESJONALNYCH GABINETACH TERAPEUTYCZNYCH, JAK I

WE WŁASNYM ZAKRESIE. SAMODZIELNE STOSOWANIE NIE JEST TRUDNE.

- BAŃKI STOSUJE SIĘ RÓWNIŻ ZWYCZAJOWO DO USUWANIA OBCYCH CIAŁ, PASOŻYTÓW SKÓRY (NP. KLESZCZY), POZOSTAŁOŚCI JADU PO UKĄSZENIACH OWADÓW I WĘŻY
- GUMOWE BAŃKI AKUPUNKTUROWE WYPIERAJĄ DOTYCHCZAS STOSOWANE SZKLANE BAŃKI, ZE WZGLĘDU NA ŁATWOŚĆ UŻYCIA, BARDZO SZEROKIE ZASTOSOWANIE, NO I NIE TŁUKĄ SIĘ.

#### ZASADA DZIAŁANIA GUMOWYCH BANIEK AKUPUNKTUROWYCH:

- BAŃKI AKUPUNKTUROWE STAWIA SIĘ W ŚCIŚLE OKREŚLONYCH PUNKTACH CIAŁA W ZALEŻNOŚCI OD SCHORZENIA WYKORZYSTUJĄC WIEDZĘ STOSOWANĄ W AKUPUNKTURZE (WSZYSTKIE PUNKTY ZAZNACZONE SĄ NA ZAŁĄCZONEJ DO ZESTAWU INSTRUKCJI). GŁOSI ONA, ŻE ENERGIA ŻYCIOWA QI KRAŻY W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA SPECJALNYMI KANAŁAMI ZWANymi MERIDIANAMI. DZIAŁANIE, NA MERIDIANY W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CIAŁA POBUDZA KRAŻENIE ENERGII QI I WYRÓWNUJE JEJ POZIOM. W TEN SPOSÓB WPŁYWA SIĘ NA STAN NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ, PRZYSPIESZAJĄC PROCES POWROTU DO ZDROWIA I POZBYWAJĄC SIĘ DOLEGLIWOŚCI.
- ZASADA DZIAŁANIA BANIEK POLEGA NA WYWOŁANIU EFEKTU WSYSANIA, WSKUTEK CZEGO SKÓRA POD BAŃKĄ JEST WCIĄGANĄ DO ŚRODKA. PRZYSTAWIANIE BANIEK W ŚCIŚLE OKREŚLONYCH PUNKTACH NA MERIDIANACH POWODUJE PRZYSPIESZENIE KRAŻENIA I PRZEPŁYWU ENERGII ŻYCIOWEJ QI, KRWI I PŁYNÓW CIAŁA W WYBRANYM, MERIDIANIE, CO INICJUJE PROCES OCZYSZCZANIA SIĘ ORGANIZMU ZE WSZYSTKICH TOKSYN ZARÓWNO PRZYJĘTYCH Z POKARMEM, JAK I POWSTAŁYCH W WYNIKU WADLIWEJ PRZEMIANY MATERII ORAZ WYTWARZANYCH PRZEZ NISZCZĄCE ORGANIZM BAKTERIE.

#### STAWIANIE BANIEK AKUPUNKTUROWYCH:

- BAŃKI STAWIANE SĄ NA POWIERZCHNI SKÓRY W PUNKTACH AKUPUNKTUROWANYCH ZAZNACZONYCH NA DOŁĄCZONYCH DO ZESTAWU OBRAZKACH. DLA KAŻDEJ DOLEGLIWOŚCI STOSUJE SIĘ PO KILKA TAKICH PUNKTÓW.
- BAŃKI STAWIA SIĘ NA WSZYSTKICH PUNKTACH SYMETRYCZNIE PO OBU STRONACH CIAŁA. W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ TYLKO 4 BAŃKI, DLATEGO TEŻ PRZYSTAWIA SIĘ JE KOLEJNO W PODANYCH PUNKTACH LUB STOSUJE SIĘ KILKA ZESTAWÓW BANIEK.
- ABY PRZYSTAWIĆ BAŃKĘ NALEŻY JĄ CHWYCIĆ OBU RĘCZAMI TRZYMAJĄC PALCAMI WSKAZUJĄCYMI I ŚRODKOWYMI ZA DOLNĄ KRAWĘDZ BAŃKI, NATOMIAST KCIUKAMI NACISKAJĄC JEJ SZCZYT. ZGNIATAJĄC BAŃKĘ W TEN SPOSÓB WYCISKA SIĘ POWIETRZE Z JEJ WNETRZA. NASTĘPNIE LEKKO PRZYCISKAJĄC DO WYBRANEGO MIEJSCA NA CIELE NALEŻY COFNAĆ PALCE Z KRAWĘDZI BAŃKI I ZWOLNIĆ UŚCISK KCIUKÓW.
- DUŻE BAŃKI STAWIA SIĘ NA STAWACH I POWIERZCHNIACH SILNIE UMIĘŚNIONYCH; MNIEJSZE W PUNKTACH WRAŻLIWYCH ORAZ U DZIECI.
- BAŃKI MOŻNA STAWIAĆ, CO 2-GI DZIEŃ NA 15 - 20 MIN. PRZEBIEG KURACJI OBEJMUJE 10 ZABIEGÓW W JEDNEJ SERII. PRZY SCHORZENIACH PRZEWLEKŁYCH STOSUJE SIĘ 7 - DNIOWE PRZERWY POMIĘDZY SERIAMI.

#### MASAŻ BAŃKĄ:

- W PRZYPADKU PRZEZIĘBIEŃ ORAZ GRYPY I INNYCH INFEKCYI MOŻNA ZASTOSOWAĆ MASAŻ PLECÓW BAŃKĄ. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZABIEGU NALEŻY CAŁĄ POWIERZCHNIĘ MASOWANĄ POSMAROWAĆ OLIWKĄ. NASTĘPNIE PRZYSTAWIA SIĘ BAŃKĘ W OKOLICY RAMIENIA NP. LEWEGO I PRZESUWA SIĘ JĄ RAZ PRZY RAZIE Z GÓRY NA DÓŁ I Z DOŁU DO GÓRY MASUJĄC CAŁĄ OKOLICĘ PLECÓW. DLA OSÓB DOROSŁYCH STOSUJE SIĘ NAJWIĘKSZĄ BAŃKĘ W ZESTAWIE, DLA DZIECI BAŃKI ODPOWIEDNIO MNIEJSZE W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU DZIECKA.
- PRZY DOLEGLIWOŚCIACH MIĘŚNIOWYCH INNYCH CZĘŚCI CIAŁA MASUJE SIĘ BOLĄCE MIEJSCA W TEN SAM SPOSÓB.

#### PRZECIWWSKAZANIA:

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU STAWIANIA BANIEK OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE STANY CHOROBOWE: MIESIĄCZKA, CIAŻA, STANY GORĄCZKOWE, ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA KRWI, ROZLEGŁE STANY ZAPALNE SKÓRY, STWARDNIENIE ROZSIANE, STANY OGÓLNEGO WYNISZCZENIA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE POWYŻEJ 200 MM HG (SKURCZOWE). W PRZYPADKU WYLEWÓW PODSKÓRNYCH I OBRZĘKÓW SPOWODOWANYCH STŁUCZENIEM LUB SKRĘNIEM NIE STOSOWAĆ BANIEK PRZED UPŁYWEM 24 GODZIN OD URAZU ORAZ NIE STOSOWAĆ NA USZKODZONĄ SKÓRĘ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA OTWARTE RANY.

NIE NALEŻY STOSOWAĆ WYROBU NIEZGODNIE Z PRZEWIDZIANYM ZASTOSOWANIEM OKREŚLONYM PRZEZ WYTWÓRCĘ I NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PRZECIWWSKAZAŃ. WYRÓB MOŻE BYĆ UŻYWANY TYLKO W WARUNKACH OPISANYCH W INSTRUKCJI UŻYWANIA. KAŻDE INNE UŻYCIE JEST UZNANE ZA NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM. WYRÓB NALEŻY CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM I NIE UŻYWAĆ GO W TEMPERATURZE NIŻSZEJ NIŻ 10 STOPNI CELSJUSA I WYŻSZEJ NIŻ 30 STOPNI CELSJUSA.

WYRÓW POWINIEN BYĆ REGULARNIE MYTY, PRZED KAŻDYM ZASTOSOWANIEM I PO NIM, MOKRĄ GĄBKĄ LUB BAWĘLIANĄ SZMAKTĄ WODĄ Z MYDŁEM I DEZYNFEKOWANY LEKKIMI DETERGENTAMI W RAZIE POTRZEBY.

- BAŃKI NALEŻY PRZECHOWYWAĆ CZYSTE W SUCHYM MIEJSCU W TEMPERATURZE POKOJOWEJ Z DALĄ OD GRZEJNIKÓW I UNIKAĆ EKSPOZYCJI SŁONECZNYCH

**PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** MERIDIAN PIOTR KAZAŁA. UL. MOGIELNICKA 19, 05-600 GRÓJEC.